

## WaterLock 2 Consumibles y accesorios

La protección perfecta para la medición precisa del gas. Dräger WaterLock 2 evita de manera segura que se introduzca agua en el sensor multigas. El sistema de medición cuenta con una protección óptima gracias a la tecnología especial de membrana de Dräger.



## Ventajas

---

### Protección segura

Dräger ha diseñado su WaterLock 2 con dos membranas hidrofóbicas en lugar de una. El sistema de protección de doble membrana no deja que el vapor de agua entre junto con el gas de muestreo ni con el de purga. Incluso cuando el tubo de muestreo entra en el sistema de aspiración de secreción, p.ej, durante un cambio de pacientes, no entrará nada de agua en el sistema de medición de gases. Dos elementos de filtración autosellantes mejoran la seguridad: volviéndose azules cuando están obstruidos.

---

### Segura y fácil de manejar

Todo lo que debe hacer para vaciar la WaterLock 2 es retirarla del soporte, introducir una jeringa en el conector y extraer el agua. La doble membrana fabricada en un material especialmente desarrollado evita de forma eficaz que cualquier bacteria o germen se introduzca en el sistema de medición de gas.

---

### El funcionamiento de la Waterlock 2 es seguro y estable

Los componentes clave del WaterLock 2 son 2 filtros fabricados a partir de una membrana microporosa hidrofóbica de PTFE. Estas membranas, con un tamaño de poro de 0,2  $\mu\text{m}$ , proporcionan una protección óptima para el sensible sistema de medición de gas. No obstante, el gas medido es capaz de atravesar la membrana con una ligera pérdida de presión. El gas atraviesa la membrana gracias a una bomba de vacío.

Un filtro elimina el agua antes de que el gas pase al sensor óptico IR. Se utiliza un segundo flujo de gas succionado a través del depósito de agua y de un segundo filtro para eliminar el agua del primer filtro. De este modo se evita que la trampa de agua se obstruya en el peor de los casos. La geometría altamente sofisticada de la carcasa del filtro ha sido optimizada para garantizar una respuesta rápida y un drenaje extremadamente efectivo. Como resultado, el WaterLock 2 mantiene un perfecto capnograma incluso en condiciones extremas, p.ej. con anestesia de flujo mínimo.

---

### Ahorro de costes

WaterLock 2 de Dräger tiene una vida útil garantizada de cuatro semanas. Durante este periodo se puede vaciar y volver a utilizar todas las veces que sea necesario. Las trampas de agua de repuesto están disponibles en juegos de 12 unidades: el suministro de un año para la estación de anestesia.

## Información para pedidos

	<b>Referencia</b>
WaterLock 2, 12 unidades	6872130
Infinity ID WaterLock 2, 12 unidades	6872020
Adaptador WaterLock 2	6872128
(para el soporte antiguo del colector de agua), 6 unidades	

## Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) para conocer el estado actual.

### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Alemania  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23542 Lübeck, Alemania

Localice a su representante  
de ventas regional en:  
[www.draeger.com/contacto](http://www.draeger.com/contacto)



### SEDE REGIONAL

#### PANAMÁ

Draeger Panamá S. de R.L.  
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,  
Dúplex 30, San Francisco  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130  
[servicioalcliente@draeger.com](mailto:servicioalcliente@draeger.com)

### VENTAS INTERNACIONALES

#### ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.  
Colectora Panamericana Este  
1717B, 1607BLF San Isidro,  
Buenos Aires, Argentina  
Tel +54 11 4836-8300 / Fax -8321

#### CHILE

Dräger Chile Ltda.  
Av. Presidente Eduardo  
Frei Montalva 6001-68  
Complejo Empresarial El Cortijo,  
Conchalí, Santiago  
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

### COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.  
Carrera 11a # 98 – 50  
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.  
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

### ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.  
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid  
Tel +34 90 011 64 24  
Fax +34 91 358 36 19  
[atencionalcliente@draeger.com](mailto:atencionalcliente@draeger.com)

### MÉXICO

Dräger Medical México,  
S.A. de C.V., German Centre  
Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
Tel +52 55 52 61 43 37  
Fax +52 55 52 61 41 32

### PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial  
S. de R.L.  
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,  
Dúplex 31, San Francisco  
Panamá, República de Panamá  
Tel +507 377-9100 / Fax -9130  
[servicioalcliente@draeger.com](mailto:servicioalcliente@draeger.com)

### PERÚ

Draeger Perú SAC  
Av. San Borja Sur 573–575  
Lima 41  
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

### PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.  
Avenida do Forte, 6–6A  
2790-072 Carnaxide  
Tel +351 21 155 45 86  
Fax +351 21 155 45 87  
[clientesportugal@draeger.com](mailto:clientesportugal@draeger.com)